

## 7. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

7.1. Поставщик гарантирует соответствие устройства требованиям на него при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных настоящим Паспортом.

7.2. Гарантийный срок устанавливается 1 год со дня продажи установки потребителю. При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью торговой организации, срок гарантии исчисляется с даты выпуска установки.

7.3. Гарантийный срок хранения на складе потребителя - 6 месяцев в упаковке изготовителя.

7.4. Поставщик гарантирует безвозмездное устранение дефектов и замену деталей, пришедших в негодность в течении гарантийного срока, при условии выполнения потребителем правил эксплуатации и хранения устройства установленных настоящим Руководством.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство принудительной вентиляции заводской № \_\_\_\_\_ соответствует техническим требованиям на него и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ М.П.  
Подпись лица ответственного  
за приемку \_\_\_\_\_

## 9. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П.  
Подпись лица ответственного  
за продажу \_\_\_\_\_

СПАРК - ДОН, ЛТД

г.Волгодонск

УСТРОЙСТВО ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  
К ЭЛЕКТРОПЕЧИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА  
УНИТЕРМ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СП 0081.00.00.000РЭ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1. Устройство принудительной вентиляции (в дальнейшем устройство) предназначено для отвода газов, образующихся при выплавлении и выжигании воска и предварительном нагреве кювет в электропечах стоматологических УниTERM и применяется в комплекте с этими печами.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 2.1. Питание от однофазной сети 220(+22 / -22)В частотой 50 Гц.  
2.2. Номинальная потребляемая мощность 50 Вт.  
2.3. Режим работы-продолжительный  
2.4. Температура окружающей среды .....15...35°C  
2.5. Относительная влажность воздуха до 90% при +20°C  
2.6. Габариты, мм:  
    -длина.....400  
    -ширина.....122  
    -высота.....152  
2.7. Масса, кг, не более .....3

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- 3.1. Устройство принудительной вентиляции .....1шт.  
3.2. Руководство по эксплуатации.....1экз.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 4.1. Запрещается:  
- пользоваться устройством в разобранном виде;  
- допускать попадание влаги в устройство;  
- вводить какие-либо предметы в устройство;  
- подвергать устройство механическим ударам.

## 5. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

5.1. Устройство устанавливается на электропечь УниTERM так, чтобы патрубок 3 (рис.1) устройства был насажен на трубу электропечи, как показано на рис.1

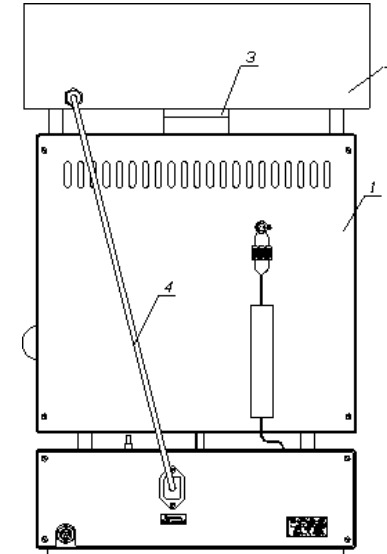


Рис.1. 1-электропечь УниTERM; 2- устройство принудительной вентиляции; 3- патрубок устройства  
4- кабель питания устройства

5.2. Подключите кабель питания устройства к специальной розетке, которая установлена на задней стенке электропечи.

## 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Устройство работает под управлением программы электропечи УниTERM.